

Highlights im Überblick

-  **Reinigungsstarke** und umweltfreundliche Inhaltsstoffe
-  **Innovative Technologie** für die optimale Trocknung und Reinigung
-  **Vorteilsgrößen** bei unseren Verpackungen
-  Reinigungsspray **wiederauffüllbar**



Die optimalen
Pflegemittel von

EASY
CLEANING



Ihr Wegweiser
für die optimale Pflege
Ihrer Hörsysteme

EASY
CLEANING

**Keep it simple –
keep it EASY CLEANING**

Die regelmäßige Reinigung und Trocknung Ihrer Hörsysteme oder Ihres Gehörschutzes sind mit unseren EASY CLEANING-Produkten schnell und einfach. Gleichzeitig bringen sie Ihnen und Ihren hochwertigen Produkten viele Vorteile:


-  **Vermeidung von Leistungsverlust**
-  **Verlängerte Lebensdauer**
-  **Geringere Gefahr von Infektionen**
-  **Vermeidung kostspieliger Reparaturen**

REINIGUNGSSPRAY

Schonende und umweltfreundliche Formel mit besten Reinigungseigenschaften. Mit Spezialzerstäuber für hygienische Sauberkeit inklusive 3D-Perleffekt.

Anwendung:

Sprühen Sie etwas Reinigungsspray auf ein weiches Tuch und reiben Sie das Gehäuse damit gründlich ab – fertig!

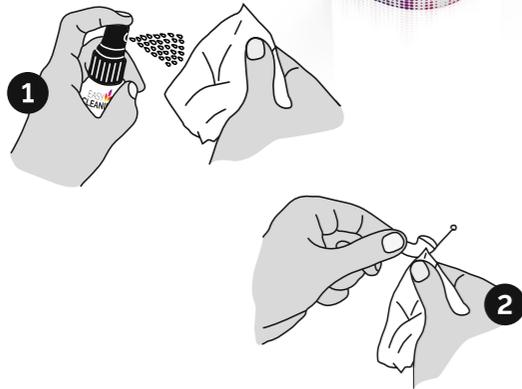

- Oberflächenschonend** mit optimalen Reinigungskomponenten
- Reinigungsstarke** und umweltfreundliche Inhaltsstoffe
- Volle Wirkung bei **langer Haltbarkeit**
- Spezial-Zerstäuber** für gründlichste Reinigung inklusive 3D-Perleffekt




FEUCHE REINIGUNGSTÜCHER IN 2 VARIANTEN.

Einzel verpackt oder im Spender.

Reinigungsstarke und gleichzeitig umweltschonende Inhaltsstoffe für die schnelle Reinigung zwischendurch. Für alle Hörsysteme, Ohrstücke, Gehörschutz und In-Ear-Monitoring.

Anwendung: 30+ 2

Reißen Sie die Umverpackung auf und nehmen Sie das feuchte Reinigungstuch heraus. Wickeln Sie das Hörsystem in das Tuch und reiben Sie es vorsichtig ab. Etwa 3 min. trocknen lassen und mit saugfähigem Tuch trockenreiben.

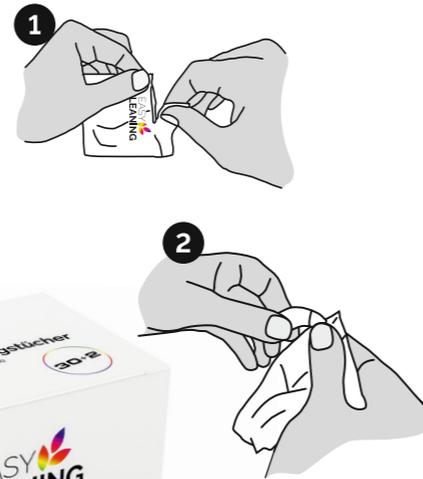

Der praktische Verschluss verhindert das Austrocknen.



POWERSPRAY AIR

Zur einfachen und gründlichen Trocknung von Hörsystemen, Gehörschutz, Ohrstücken und Schallschlauch nach der Reinigung.

Anwendung:


Mit kurzem Sprühstoß trocknen. Nicht in Lautsprecher- oder Mikrofonöffnungen sprühen.



Anwendung: 90+ 10

Ziehen Sie den Deckel nach oben, um die Folie zu entfernen. Das erste Tuch aus der Rollenmitte vorsichtig mit den Fingern durch die Spenderöffnung ziehen. Nachdem der Deckel wieder geschlossen ist, das erste Tuch schräg herausziehen, bis es an der Perforation abreißt.

Wickeln Sie das Hörsystem in das Tuch und reiben Sie es vorsichtig ab. Etwa 3 min. trocknen lassen. und mit saugfähigem Tuch trockenreiben.

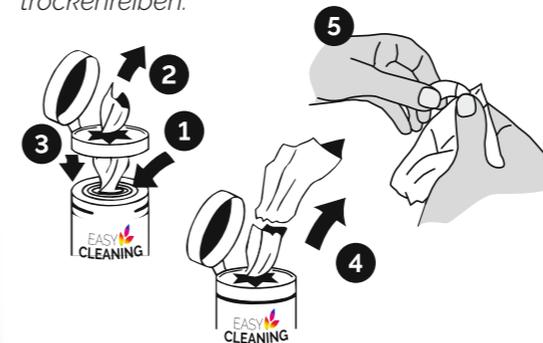


DRY CAP UV 3

Die professionelle Trocknungs- und Hygienestation für alle Hörsysteme – egal ob mit Akku oder Batterie.

Anwendung:

Der Dry&Clean-Modus (Dauer: 2 Stunden) ist ein Automatikprogramm und kombiniert schnelle Trocknung durch ein effizientes Luftgebläse mit UV-C-Licht am Anfang und am Ende der Trocknungszeit für perfekte Hygiene.

Der Clean-Modus (Dauer: 2 Minuten) ist ein Kurzzeit-Hygieneprogramm und startet das optimierte UV-C-Licht, bei dem wirkungsvoll bis zu 99,9 % der sich im Haushalt befindlichen Keime, Bakterien, Viren und Pilze eliminiert werden.

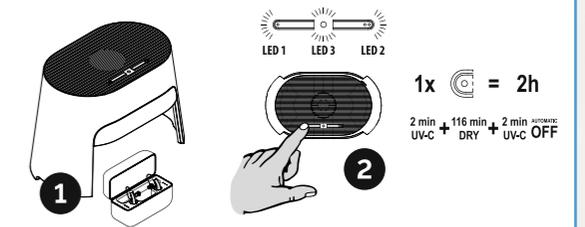

- Perfekte Schnell-Trocknung** durch Luftgebläse
- Für **batteriebetriebene** und **wiederaufladbare Hörsysteme**
- Hygienische Reinigung** durch UV-C-Licht
- Gleichzeitiges Trocknen & Laden** der Hörsysteme